

# Attends® Pull-Ons



## Průvodce

- 1 Příprava**  


Změřte kyčle a pas a s použitím větší velikosti, vyberte správnou velikost výrobku.
- 2 Nasazení**  


Kalhotky Attends Pull-Ons mohou být použity jako běžné spodní prádlo. Lze je stáhnout dolů a opět nahoru, dle Vaší potřeby.
- 3 Přizpůsobivost**  


Elasticita zajišťuje kalhotkám příjemné a komfortní nošení, zatímco prodyšný materiál je šetrný k pokožce.
- 4 Odstranění**  


Výměna a odstranění kalhotek je velmi snadná: stačí kalhotky stáhnout dolů nebo je roztrhnout po obou stranách.

## Tipy a rady

### Výběr

- Vyberte si velikost kalhotek podle obvodu boku a pasu -dle toho, co je větší.
- Na základě množství úniku moče si zvolte odpovídající stupeň savosti. Předtím, než si vyberete vyšší stupeň, začněte s nižším stupněm absorpce, například stupeň 3, aby Vaše pomůcka byla diskretní a pohodlná.
- Kalhotky nabízejí účinné řešení pro uživatele, kterým tvarované kalhotky nesedí.

### Nasazení

- Zkontrolujte, zda jsou kalhotky správně nasazený.

### Likvidace

- Kalhotky srolujte a zlikvidujte podle platných postupů pro likvidaci klinického odpadu.
- Kalhotky nesplachujte do toalety.



Attends Pull-Ons testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Pro více informací navštivte [www.attends.cz](http://www.attends.cz)